


HALTBARKEIT UND LAGERUNG AUF EINEN BLICK

HALTBARKEIT LAGERUNG

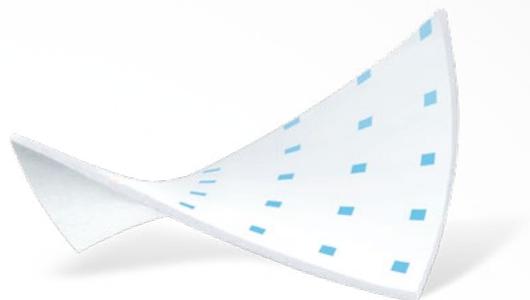


- ✓ Bei Raumtemperatur = 6 Monate haltbar
- ✓ Im Kühlschrank = 18 Monate haltbar

Ungeöffnetes Produkt

- ✓ Im Kühlschrank (bei 2–8 °C) oder bei Raumtemperatur (bis max. 25 °C) lagern

Geöffnetes Produkt

- ✓ HEMOPATCH kann nach dem Öffnen der zweiten sterilen Verpackung innerhalb von 12 Stunden verwendet werden.²

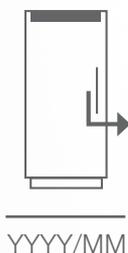

! Wichtig: Einmal bei Raumtemperatur gelagertes HEMOPATCH darf nicht in den Kühlschrank zurückgelegt werden. Bitte auf der Schachtel oder dem Alu-Beutel den Monat und das Jahr der Entnahme vermerken, und HEMOPATCH innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

YYYY/MM

Hinweis: HEMOPATCH wird gebrauchsfertig in sterilen Verpackungen geliefert. Nur unbeschädigte Verpackungen verwenden, nur zum einmaligen Gebrauch, nicht resterilisieren.

BESTELLUNG DEUTSCHLAND

Kostenlose Bestell-Hotline: +49 800 7235 636
Kostenloses Fax: +49 800 1010619

BESTELLUNG ÖSTERREICH

Kostenlose Bestell-Hotline: +43 17 11 20 0
Kostenloses Fax: +43 17 11 20 24 510 20

¹ HEMOPATCH Sealing Hemostat Gebrauchsanweisung, April 2017, Baxter AG Österreich
² Gulle et al. 2017, Internal Data on File;

Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

CE 0297

Baxter and HEMOPATCH are trademarks for Baxter International Inc., its subsidiaries or affiliates.



www.baxterprofessional.de